


COLOCACIÓN Y RETIRO DE LA MASCARILLA N95/KN95


Colocación



1 Antes de tocar la mascarilla, higieniza tus manos con solución de alcohol o con agua y jabón

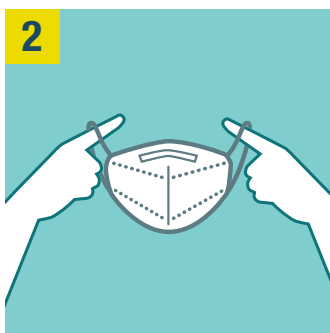

2 Toma la mascarilla de los elásticos, e inspecciona si ésta se encuentra en buen estado (sin roturas o agujeros)

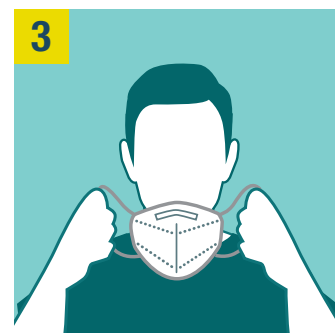

3 Posiciona la mascarilla frente a tu cara, orientando la parte superior hacia arriba (tira metálica ajustable)



4 Cubre tu nariz, boca y mentón con la mascarilla, ajustando los elásticos en cada oreja



5 Ajusta la mascarilla a tu nariz usando la tira metálica, sopla y verifica que el aire no salga por los lados. Si es necesario, reajústala nuevamente



6 Evita tocar la mascarilla durante su uso. Si la tocas, higieniza tus manos

COLOCACIÓN Y RETIRO DE LA MASCARILLA N95/KN95


Retiro




1 Antes de retirar la mascarilla, higieniza tus manos con solución de alcohol o con agua y jabón



2 Toma la mascarilla de los elásticos y retírala intentando no tocar las superficies potencialmente contaminadas

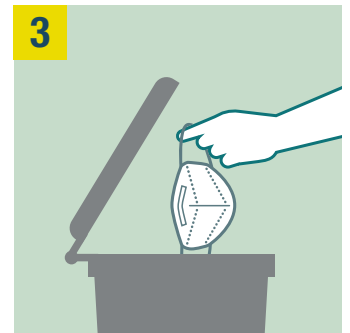

3 Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado y especialmente definido para la eliminación de mascarillas, o guárdala en una bolsa personal definida para su conservación

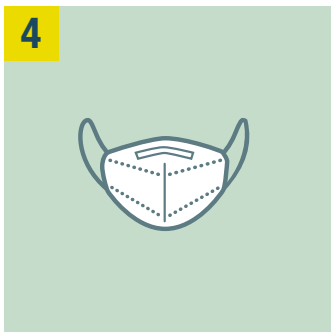

4 Reemplaza tu mascarilla por una nueva cuando esté húmeda o rota, siguiendo los pasos ya indicados en la sección de colocación, que incluye la higienización de manos



5 Al terminar el proceso de retiro y nueva postura, higieniza tus manos con solución de alcohol o con agua y jabón